



Mounjaro® KwikPen®.

Застосування та інша важлива інформація в короткому огляді


1. Підготовка

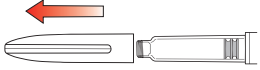


- Зніміть захисний ковпачок зі шприц-ручки по прямій лінії
- Перевірте шприц-ручку, дозування та термін придатності

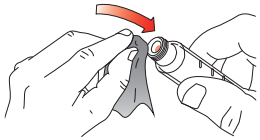



- Протріть червоне внутрішнє ущільнення тампоном, змоченим спиртом

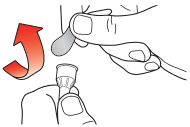


- Візьміть нову голку для шприц-ручки
- Зніміть захисний папір.

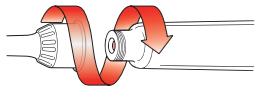


- Притисніть голку з захисним ковпачком **вертикально до шприц-ручки**
- Повертайте голку, поки вона не буде **надійно триматися**
- Зніміть зовнішній захисний ковпачок голки й збережіть його.** Він використовується повторно
- Зніміть внутрішній захисний ковпачок голки **й утилізуйте його**

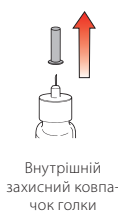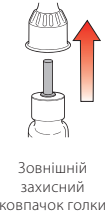



2. Випуск повітря

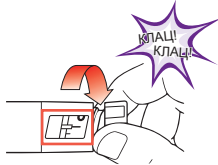

- Повертайте кнопку дозування, поки не почуєте **2 клацання** підряд
- Ви повинні побачити довгу риску. Це **положення випуску повітря**
- Для коригування положення випуску повітря кнопку дозування можна повертати в **обох напрямках**

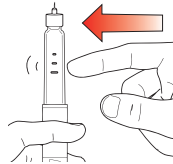

- Поверніть шприц-ручку голкою вгору.
- Легенько постукайте по тримачу картриджа, щоб повітряні бульбашки зібралися вгорі
- Натисніть кнопку дозування **до упору**, щоб випустити в повітря невелику кількість препарату
- Утримуючи кнопку дозування в натиснутому положенні, **полічіть до 5**
- У віконці дозування має з'явитися **0**. Не робіть ін'єкцію в тулуб
- Випуск повітря** потрібен для видалення повітря з картриджа
- Повітря видалено успішно, якщо з голки шприц-ручки **виділилася невелика кількість** препарату

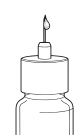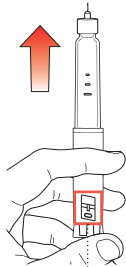

ТРИМАЙТЕ
5 секунд




Зверніть увагу:


З кожної шприц-ручки **можна випускати повітря не більше восьми разів!** Перевищення допустимої кількості процедур випуску повітря може призвести до **блокування шприц-ручки** перед четвертою (останньою) ін'єкцією

- Якщо ознаки виділення препарату відсутні:** повторіть крок (не більше двох разів)
- Якщо ознак виділення препарату знову немає:** замініть голку шприц-ручки й повторіть крок (не більше одного разу)
- Якщо ознак виділення препарату знову немає:** зверніться до представництва компанії Lilly (контактні дані наведені в інструкції, що додається до виробу)


3. Ін'єкція

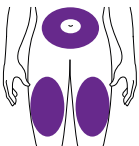

- Робіть ін'єкцію в стегно чи живіт
- Відстань від пупка має бути не менше **5 сантиметрів**
- Змінійте місце ін'єкції **щотижня**

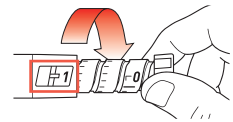


- Повертайте кнопку дозування, поки вона не зупиниться, а у віконці дозування не з'явиться цифра **1**
- Цифра **1** відповідає **повній дозі**

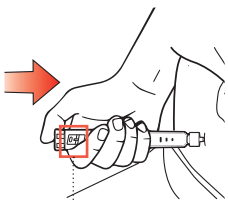


ТРИМАЙТЕ
5 секунд


- Устроміть голку в шкірний покрив
- Натисніть кнопку дозування **до упору**, щоб увести препарат
- Утримуючи кнопку дозування в **натиснутому положенні, повільно полічіть до 5**
- Поява цифри **0** у віконці дозування означає, що дозу **введено повністю**
- Дістаньте голку зі шкіри.** Якщо на кінчику голки є крапля препарату, це нормально. Ця крапля **не впливає на розмір дози**
- Якщо у віконці дозування **видно** цифру **0**, це означає, що дозу введено в повному обсязі
- Якщо цифру **0** **не видно** у віконці дозування, потрібно знову встромити голку в шкіру й завершити ін'єкцію.
- НЕ змінюйте** налаштування дози
- Якщо у вас склалося враження, що ви **не ввели повну дозу, НЕ робіть** повторну ін'єкцію
- Зверніться до представництва компанії Lilly (див. інструкцію, що додається до виробу)

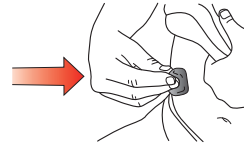

- Якщо виступить кров, злегка притисніть тампон до місця ін'єкції — **НЕ тріть**

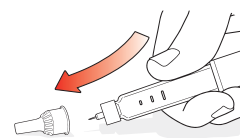

- Обережно надягніть на голку **зовнішній захисний ковпачок**

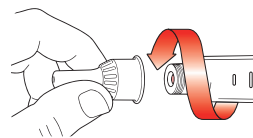

- Відкритіть голку з **надягнутим на неї зовнішнім захисним ковпачком**
- НІКОЛИ** не зберігайте шприц-ручку з надягнутою голкою, щоб уникнути таких небажаних явищ як:
 - протікання;
 - забивання;
 - потраплення повітря всередину шприц-ручки



- Надягніть захисний ковпачок
- НІКОЛИ** не зберігайте шприц-ручку без захисного ковпачка

Важлива вказівка: для ін'єкції препарату Mounjaro® за допомогою шприц-ручки Mounjaro® KwikPen® потрібні голки. Лікар (-ка), який (-ка) вас лікує, порекомендує голки й випише відповідний рецепт.

Коли робити ін'єкцію?

- Завжди робіть ін'єкцію Mounjaro® в один і той самий день тижня. Порада: налаштуйте нагадування на цей день у телефоні чи календарі
- День щотижневої ін'єкції можна змінити за умови, що інтервал між двома дозами буде не менше 3 днів

Пропустили введення дози?

- Зробіть ін'єкцію якомога швидше протягом чотирьох днів з дня пропущеної дози
- Якщо минуло більше чотирьох днів:
 - пропустіть цю дозу;
 - зробіть ін'єкцію наступної дози за графіком;
 - продовжуйте робити ін'єкції регулярно, 1 раз на тиждень

Зберігання до відкриття

- До першого використання зберігайте шприц-ручку в холодильнику за температури від 2 до 8 °C
- Невідкриті шприц-ручки можна використати до закінчення строку придатності
- Ніколи не заморожуйте шприц-ручку. Якщо ви помилково заморозили шприц-ручку, утилізуйте її

Зберігання після відкриття

- Відкриту шприц-ручку можна зберігати за кімнатної температури нижче 30 °C
- Шприц-ручку слід утилізувати через 30 днів після першого використання, навіть якщо в ній ще залишився препарат
- Після введення четвертої щотижневої дози шприц-ручку слід утилізувати

Залишок усередині шприц-ручки Mounjaro® KwikPen® після четвертої ін'єкції

- Після введення четвертої дози усередині шприц-ручки ще залишається невелика кількість препарату
- Обсяг залишку препарату не відповідає повній дозі, тому його не слід вводити
- Шприц-ручку із залишком препарату слід утилізувати після введення четвертої (останньої) дози



Залишок

Утилізація

- Для вживаних голки для шприц-ручки використовуйте стійке до проколів пакування
- Mounjaro® KwikPen®: відповідно до вказівок лікаря

Важливо: обов'язково прочитайте листок-вкладиш, що додається до Mounjaro® KwikPen®, і дотримуйтеся її.

Де можна дізнатися більше?

Зверніться до медичного працівника

Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з **листком-вкладишем**, яка додається до шприц-ручки Mounjaro® KwikPen®, або просто відскануйте QR-код.



Листок-вкладиш

www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro — перейдіть за посиланням або відскануйте QR-код



Сайт

Відскануйте QR-код, щоб перейти до докладної **інструкції** з використання шприц-ручки Mounjaro® KwikPen®



Відеоінструкція