


# HANDBUCH FÜR DIE META QUEST 3 VR-BRILLE

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- **Notwendige Ausrüstung:** Meta Quest 3 VR-Brille
- **Akkulaufzeit:** ca. 2 Stunden Dauernutzung (daher vor Nutzung aufladen)
- **Vorsicht:** Brille vorsichtig behandeln wegen der Kameras und Sensoren

## ALLGEMEINE EINLEITUNG & STEUERUNG

- **Platzbedarf:** Vor der Nutzung genügend Platz sicherstellen, da das Sichtfeld eingeschränkt ist
- **Spielbereich:** Automatisch oder manuell einstellen, um Kollisionen mit Hindernissen zu vermeiden
- **Steuerung:** Rheumality wird ausschließlich über Handgesten gesteuert, die mitgelieferten Controller werden nicht benötigt (Die Anwendung Medreality darf nur per Hand gestartet werden, nicht mit dem Controller)

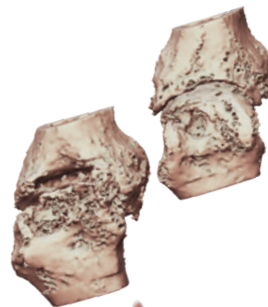

## HANDBUCH FÜR DIE META QUEST 3 VR-BRILLE

### META QUEST 3 VR-BRILLE

- **Anschalten:** Knopf an der Seite drücken, bis das blaue Meta-M erscheint
- **Anpassung:** Brille durch Auseinanderziehen der Punkte am Hinterkopf und Klettverschluss oben am Kopf anpassen

#### Bedeutung der LED-Kontrolleuchte an der VR-Brille:

	LED-Farbe	Bedeutung
	Weiß	Headset eingeschaltet
	Grün	Akku vollständig geladen
	Orange	Akku wird geladen
	Rot	Akku leer

### BEGRENZUNG / SPIELBEREICH EINSTELLEN

- **Stationär:** Standardmäßiger Begrenzungsbereich von 1 x 1 Meter
  - o Mit dieser Option kann die VR-Brille im Sitzen oder Stehen an einer Stelle verwendet werden
- **Freiraum:** Mindestens 2 x 2 Meter freier Bereich empfohlen
  - o Diese Option ist geeignet, um sich mit der VR-Brille frei im Raum zu bewegen. Im Freiraum-Modus können Begrenzungen im Raum selbst gezeichnet werden

## HANDBUCH FÜR DIE META QUEST 3 VR-BRILLE


### STARTEN DER APP – MEDREALITY UND RHEUMALITY

Um Rheumality auszuführen, muss zunächst die Anwendung Medreality gestartet werden. **Medreality** ist gut durch die pinke Farbe erkennbar und kann über zwei Wege geöffnet werden:


- **Option 1:** Über Taskleiste
- **Option 2:** Über Appmenü (Medreality auswählen)

Beim Start wird man zur Eingabe eines Codes aufgefordert, dieser lautet: **92018**


**Option 1:**  
Über Taskleiste  
(direkt in die App einsteigen)

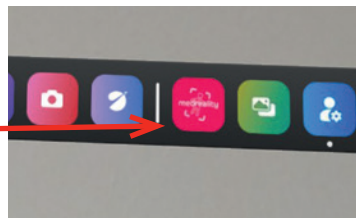

**Option 2:**  
Über Appmenü

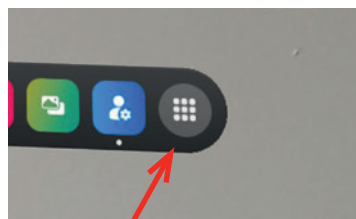

Schritt 1:  
In das Appmenü navigieren

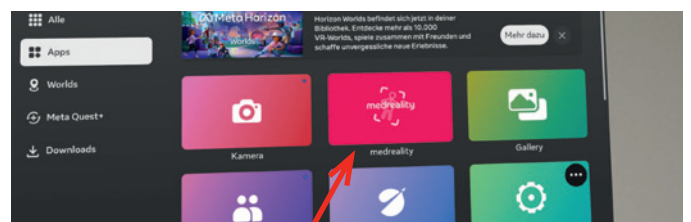




Schritt 2: Auswahl von Medreality im Appmenü

# HANDBUCH FÜR DIE META QUEST 3 VR-BRILLE

## STEUERUNG

- **Buttons:** 7 verschiedene Buttons zur Auswahl
- **Karten:** Auswahl durch Berühren mit der flachen Hand
- **Knochen greifen und bewegen:** Hand in den Knochen bewegen und Daumen und Zeigefinger zusammendrücken. Solange die Hand geschlossen ist, bewegt sich der Knochen mit der Hand
- **Vergrößern/Verkleinern:** Knochen mit beiden Händen greifen und nach außen bzw. innen bewegen
- **Navigation in der Anwendung:** Durch drücken des “->” weiter Buttons

**Tipp:** Lautstärke an den Tasten an der Unterseite der Brille einstellen, um den Klickton bei Betätigung der Kacheln zu hören.

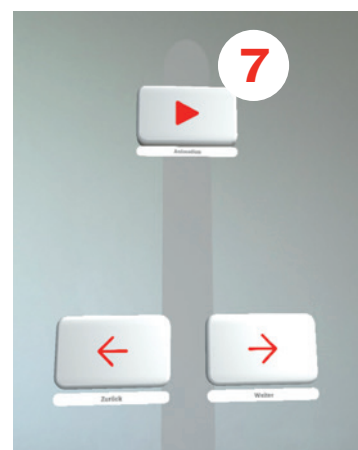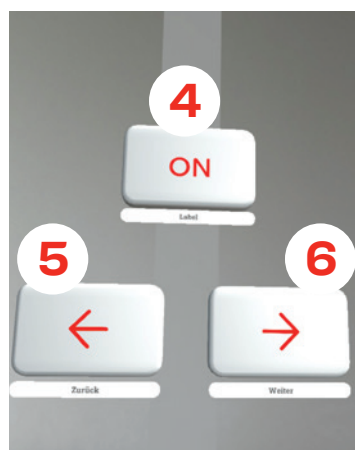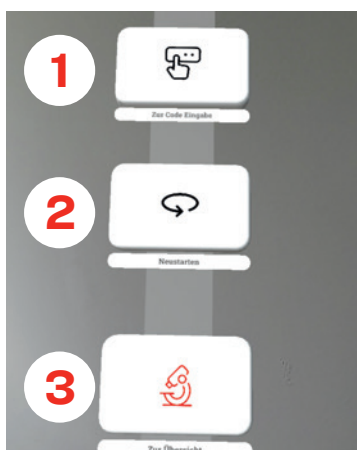

1 Code-Eingabe

2 Neustarten = Zur Sprachauswahl

3 Pathologieauswahl = alle Fälle oder PsA, axSpA, RA einzeln

4 ON = Anschalten der Zusatzinformationen



5 Zurück = Im Patientenfall navigieren

6 Weiter = Im Patientenfall navigieren

7 Play = Erneutes Abspielen von Animationen

## HANDBUCH FÜR DIE META QUEST 3 VR-BRILLE

**Tipp:** Das Sichtfeld neu zentrieren, wenn der projizierte Inhalt nicht mehr zentral zu sehen ist: Handfläche öffnen und Daumen und Zeigefinger zusammengedrückt halten:

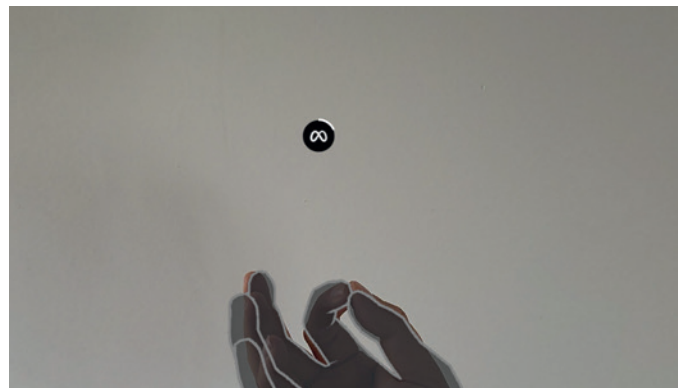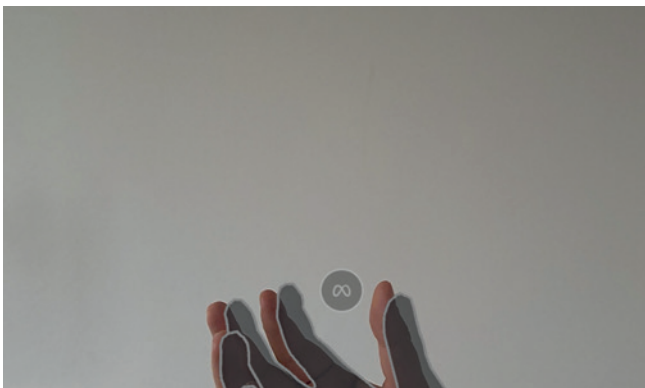

### BEI WEITEREN FRAGEN WENDEN SIE SICH GERNE AN:

Katharina Bayerl  
Projektmanagerin Lilly Deutschland GmbH  
+49 152 01830031  
bayerl\_katharina@lilly.com