




1. Подготовка

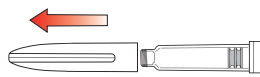


- Возьмите шприц-ручку прямо и снимите с него колпачок.
- Проверьте шприц-ручку, дозировку и срок годности.

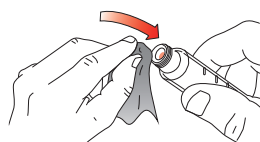


- Протрите красное внутреннее уплотнение спиртовым тампоном.

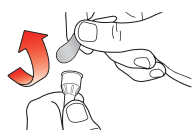


- Установите новую иглу на шприц-ручку.
- Удалите защитную бумагу.

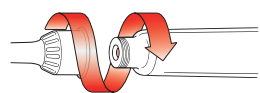

- Наденьте иглу с защитным колпачком **вертикально на шприц-ручку**.
- Поверните иглу до **фиксации**.
- Снимите внешний защитный колпачок иглы и сохраните его.** Он понадобится в дальнейшем.
- Снимите и выбросьте** внутренний защитный колпачок иглы.

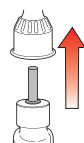

Внешний защитный колпачок иглы

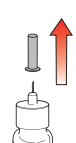


Внутренний защитный колпачок иглы

2. Удаление воздуха



- Поверните вращающуюся кнопку дозатора, пока не услышите **2 щелчка**.
- Должна быть видна самая длинная линия. Это положение для **удаления воздуха**.
- Корректировка положения для удаления воздуха: кнопку дозатора можно вращать в **обоих направлениях**.

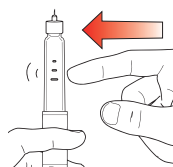


- Возьмите шприц-ручку иглой вверх.
- Слегка постучите пальцем по корпусу картриджа, чтобы пузырьки воздуха собрались вверх.
- Нажмите** кнопку дозатора **до упора**, выпустив немного лекарственного средства в воздух.
- Удерживая кнопку дозатора нажатой, **досчитайте до 5**.
- В окошке дозатора должна быть видна цифра **0**. Пока не делайте инъекцию.




- Удаление воздуха** гарантирует, что в картридже не осталось воздуха.
- Если на конце иглы выступила **капля** лекарственного средства, значит воздух из шприца-ручки **удален**.
- Обратите внимание:** шприц-ручка рассчитана максимум на **8 циклов удаления воздуха!** Слишком частое удаление воздуха может привести к **блокировке шприца-ручки** перед 4-й (последней) инъекцией.
- Если лекарственное средство не выступило на игле:** повторите действие (еще максимум два раза).
- Если лекарственное средство все равно не выступило на игле:** замените иглу шприца-ручки и повторите действие (максимум один раз).
- Если лекарственное средство так и не выступило на игле:** обратитесь в представительство компании Lilly (указано на вкладыше к упаковке).

3. Инъекция

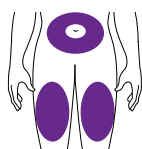

- Бедра или живот.
- Не менее **5 см** от пупка.
- Меняйте место инъекции **еженедельно**.

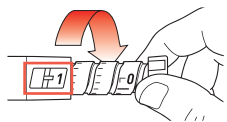


- Поверните вращающуюся кнопку дозатора до упора, чтобы в окошке дозатора появилась цифра **1**.
- 1** соответствует **полной дозе**.




5 сек.
ПОДОЖДИТЕ


- Проколите иглой кожу.
- Нажмите кнопку дозатора **до упора** (и сделайте инъекцию лекарства).
- Удерживая кнопку дозатора **нажатой, медленно досчитайте до 5**.
- Если в окошке дозатора видна цифра **0**, доза **введена полностью**.
- Извлеките иглу из кожи.** Если на конце иглы видна капля лекарства, это нормально. Это **не влияет на дозировку**.
- Если в окошке дозатора **видна** цифра **0**, доза введена полностью.
- Если цифра **0 не видна** в окошке дозатора, снова проколите кожу иглой и завершите инъекцию.
- НЕ переустанавливайте дозу.**
- Если после этого вам кажется, что доза введена **не полностью, НЕ** делайте инъекцию заново.
- Обратитесь в представительство компании Lilly (см. вкладыш в упаковку).

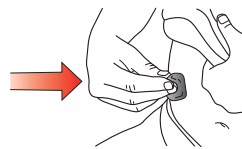


- Если выступила кровь, слегка прижмите место инъекции тампоном – **НЕ трите**.

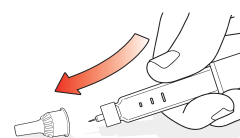

- Осторожно наденьте **внешний** защитный колпачок на иглу.

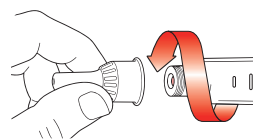

- Отвинтите иглу с **надетым внешним защитным колпачком**.
- НЕ** храните шприц-ручку с присоединенной иглой во избежание:
 - вытекания лекарства,
 - закупорки,
 - попадания воздуха в шприц-ручку.

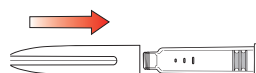

- Закройте защитным колпачком.
- НЕ** храните шприц-ручку без защитного колпачка.

Важное примечание: для инъекций препарата Mounjaro® с помощью шприца-ручки Mounjaro® KwikPen® требуются иглы. Рекомендации по поводу игл или рецепт на них можно получить у вашего лечащего врача.

Когда делать инъекцию

- Вводите препарат Mounjaro® всегда в один и тот же день недели. Совет: настройте напоминание в телефоне или отметьте в календаре.
- День еженедельного введения дозы можно изменить, но следите за тем, чтобы интервал между двумя дозами составлял не менее 3 дней.

Пропустили дозу?

- Если вы пропустили дозу, введите ее по возможности скорее, не позднее чем через 4 дня после дня пропуска.
- Если с момента пропуска прошло больше 4 дней:
 - не вводите пропущенную дозу,
 - сделайте следующую инъекцию в установленный день по графику,
 - в любом случае продолжайте вводить препарат 1 раз в неделю.

Хранение до вскрытия

- Храните еще не использовавшиеся шприцы-ручки в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C.
- Невскрытые шприцы-ручки можно использовать до истечения срока годности.
- Не замораживайте шприцы-ручки. Если вы случайно заморозили шприц-ручку, выбросите ее.

Хранение после вскрытия

- Вскрытые шприцы-ручки можно хранить при комнатной температуре не выше 30 °C.
- Шприц-ручку следует утилизировать через 30 дней после первого использования, даже если в ней осталось лекарство.
- Утилизируйте шприц-ручку после введения четвертой недельной дозы.

Остаточное количество в шприце-ручке Mounjaro® KwikPen® после 4-й инъекции

- После 4-й дозы в шприце-ручке остается некоторое количество лекарства.
- Остаточное количество не соответствует полной дозе и его не следует использовать для инъекций.
- Шприц-ручку с остатками лекарства необходимо утилизировать после 4-й (последней) дозы.



Остаточное количество

Утилизация

- Использованные иглы от шприцов-ручек: в непрокалываемый контейнер.
- Mounjaro® KwikPen®: в соответствии с указаниями врача.

Важно: обязательно прочтите инструкцию по применению Mounjaro® KwikPen® и следуйте ей.

Подробнее:

по основным вопросам обращайтесь к медицинским работникам

Дополнительные сведения см. в **инструкции по применению**, прилагающейся к шприцу-ручке Mounjaro® KwikPen®, или отсканируйте QR-код.



Открыть инструкцию по применению

Посетите сайт www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro или отсканируйте QR-код.



Перейти на веб-сайт

При сканировании QR-кода отобразится ссылка на подробную **инструкцию** по применению шприца-ручки Mounjaro® KwikPen®.



Открыть видеоинструкцию