


– Mounjaro® KwikPen® الاستخدام ومعلومات أخرى مهمة في نبذة

1. التحضير

- اسحب الغطاء الواقي للقلم مباشرة
- فحص القلم، وتركيز الجرعات وتاريخ انتهاء الصلاحية

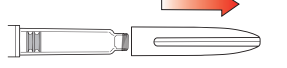



- امسح الختم الداخلي الأحمر بمسحة كحولية



- استخدم إبرة قلم جديدة
- أزل ورقة الحماية



- اضغط الإبرة المزودة بغطاء حماية عموديًا على القلم
- أدر الإبرة حتى تستقر في مكانها بإحكام
- اسحب غطاء حماية الإبرة الخارجي واحفظه. سيتم إعادة استخدامه
- اسحب غطاء الإبرة الواقي الخارجي وتخلص منه

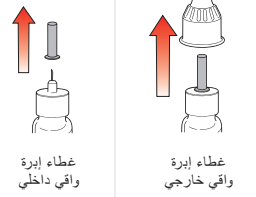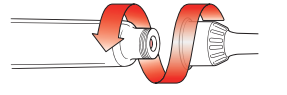


2. تفريغ الهواء

- أدر زر الجرعات حتى تسمع نقرتين
- يجب أن يكون الخط المطول مرئيًا. هذا هو موضع تفريغ الهواء.
- تصحيح موضع تفريغ الهواء: يمكن إدارة زر المعايرة في كلا الاتجاهين



- أمسك القلم بحيث تكون الإبرة لأعلى
- انقر برفق على حامل الخرطوشة لتجميع فقاعات الهواء عند الطرف.
- أطلق بعض الدواء في الهواء عن طريق الضغط على زر الجرعات حتى يتوقف.
- أبق زر الجرعات مضغوطاً وعد حتى 5
- يجب عرض 0 في نافذة الجرعات. لا تحقن في الجسم.
- تصريف الهواء يضمن أن الهواء يخرج من الخرطوشة
- يكون هواء القلم مفرغاً عندما تتسرب كمية صغيرة من الدواء من إبرة القلم

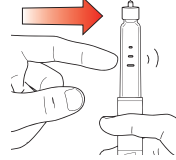


• يرجى مراعاة ما يلي:

- الحد الأقصى هو 8 عمليات تفريغ هواء لكل قلم! تفريغ الهواء بشكل مفرط قد يؤدي إلى انسداد القلم قبل عملية الحقن الرابعة (الأخيرة)
- لا يمكن رؤية الدواء: كرر الخطوة (لا تحاول أكثر من مرتين إضافيتين)
- لا زلت لا تستطيع رؤية الدواء: قم بتبديل إبرة القلم وكرر الخطوة (لا تحاول أكثر من مرة أخرى)
- لا زلت لا تستطيع رؤية الدواء: اتصل بمكتب Lilly (مذكور في النشرة المرفقة مع الدواء)




3. الحقن


- الفخذ أو البطن
- على بعد 5 سنتيمترات على الأقل من سرة البطن
- غير موقع الحقن كل أسبوع

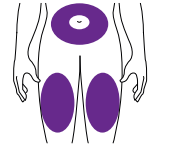

- قم بتدوير مقبض الجرعات حتى يتوقف ويصبح الرقم 1 مرئيًا في نافذة الجرعات
- الرقم 1 يتوافق مع الجرعة الكاملة

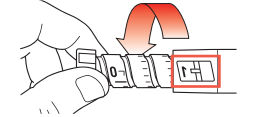

- أدخل الإبرة في الجلد
- احقن الدواء بالضغط على زر الجرعات حتى يتوقف. (حقن الدواء)
- أبق زر الجرعات مضغوطاً وعد ببطء حتى 5
- بمجرد ظهور الرقم 0 في نافذة الجرعات، يكون قد تم حقن الجرعة بالكامل
- اسحب الإبرة من الجلد. يُعد وجود قطرة من الدواء على طرف الإبرة هو أمر طبيعي. ولن يؤثر ذلك على جرعتك
- إذا كان الرقم 0 مرئيًا في نافذة الجرعات، ستكون قد حصلت على الجرعة الكاملة
- إذا كان الرقم 0 غير ظاهر في نافذة المعايرة، قم بوخز الإبرة مجددًا في الجلد وأنه الحقن
- لا تغير إعداد الجرعة
- إذا كنت لا تزال تشعر بأنك لم تتلق الجرعة بالكامل – فلا تحقن نفسك مجددًا
- اتصل بمكتب Lilly (انظر النشرة المرفقة بالعبوة)

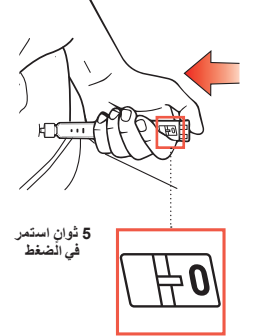


5 ثوان استمر في الضغط




- إذا كان الدم مرئيًا، اضغط برفق على موضع الحقن باستخدام مسحة – لا تفرك




- ركب بعناية غطاء الإبرة الخارجي الواقي

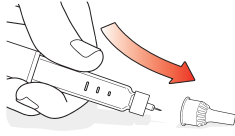

- فك الإبرة المزودة بغطاء واقي خارجي
- لا تحفظ القلم أبدًا بينما تكون الإبرة مركبة حتى تتجنب:
- التسريب،
- الانسداد،
- دخول الهواء
- إلى داخل القلم

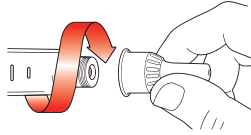

- ركب الغطاء الواقي
- لا تحفظ القلم أبدًا دون تركيب الغطاء الواقي أولاً

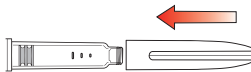

ملاحظة مهمة: يلزم وجود إبر لحقن Mounjaro® باستخدام قلم Mounjaro® KwikPen®. يُصدر الطبيب المعالج الأمر بخصوص الإبرة والوصفة الطبية الخاصة بذلك.

متى يتم الحقن؟

- احرص دائمًا على استخدام Mounjaro® في نفس اليوم من كل أسبوع. نصيحة: قم بضبط تذكير في الهاتف أو التقويم لهذا اليوم.
- ويمكن تغيير يوم الجرعة الأسبوعية بحسب اللزوم، طالما أن الفترة بين الجرعتين لا تقل عن 3 أيام.

هل فاتتك جرعة؟

- يجب تلقي الجرعة الفائتة في أقرب وقت ممكن خلال 4 أيام من وقت نسيانها.
- إذا انقضى أكثر من 4 أيام:
 - تخطى الجرعة المنسية
 - وتلقى الجرعة التالية بشكل منتظم في اليوم المخطط له
 - متابعة إعطاء الجرعة بانتظام مرة واحدة في الأسبوع

التخزين قبل الاستعمال لأول مرة

- يُرجى تخزين القلم في الثلاجة قبل أول استخدام بين 2 درجة مئوية و 8 درجات مئوية.
- يمكن استخدام الأقلام غير المستخدمة حتى انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية
- لا تجمد القلم أبدًا. تخلص من القلم إذا تم تجميده عن طريق الخطأ

التخزين بعد الاستعمال

- يمكن تخزين القلم المستخدم في ظل درجة حرارة الغرفة الأقل من 30 درجة مئوية
- تخلص من القلم بعد 30 يومًا من الاستخدام الأول حتى لو كان هناك دواء داخل القلم.
- تخلص من القلم بعد تلقي حقنة الأسبوع الرابع

الكمية المتبقية في Mounjaro® KwikPen® بعد الحقنة الرابعة

- بعد حقن الجرعة الرابعة، يتبقى بعض الدواء.
- بقايا الدواء لا تكفي لإعطاء جرعة كاملة ولا ينبغي حقنها
- يجب التخلص من القلم مع بقايا الأدوية التي به بعد الجرعة الرابعة (الأخيرة)



الكمية المتبقية

التخلص من المنتج

- إبر الأقلام المستعملة: حاوية مقاومة للثقب
- Mounjaro® KwikPen®: بحسب تعليمات الطبيب

هام: احرص على قراءة تعليمات الاستخدام المرفقة مع Mounjaro® KwikPen® والتزم بها.

تعرف على المزيد:

الطاقم الطبي هو جهة الاتصال الأولى

إن مسح كود الاستجابة السريعة بقودك إلى الدليل التفصيلي لاستخدام قلم Mounjaro® KwikPen®

إلى فيديو طريقة الاستخدام



اطلع على الموقع

www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro

أو امسح كود الاستجابة السريعة

إلى الموقع الإلكتروني



توجد المزيد من المعلومات في معلومات الاستخدام المرفقة مع Mounjaro® KwikPen® أو ببساطة امسح كود الاستجابة السريعة

إلى معلومات الاستخدام

