



Mounjaro® KwikPen® – stosowanie i inne ważne informacje w skrócie

Przy każdym wstrzyknięciu należy wykonać wszystkie kroki!

1. Przygotowanie


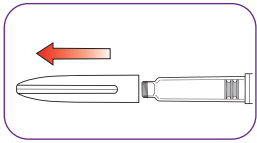


Ściągnąć osłonę ochronną wstrzykiwacza w linii prostej oraz sprawdzić wstrzykiwacz i etykietę.

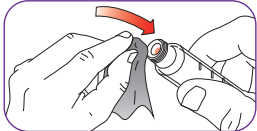

Wziąć nową igłę wstrzykiwacza

- Wytrzeć czerwoną uszczelkę wewnętrzną wacikiem.
- Zastosować nową igłę do wstrzykiwacza do każdego wstrzyknięcia, aby uniknąć zakażenia i zablokowania igły.
- Usunąć papier ochronny z zewnętrznej osłony ochronnej igły.

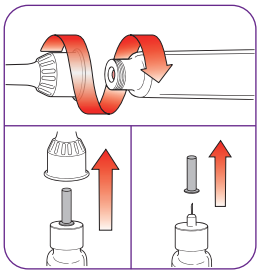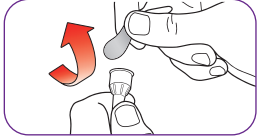


- Wcisnąć igłę z osłoną ochronną prostopadle na wstrzykiwacz i kręcić igłą aż do jej pewnego zamocowania.
- Odciągnąć zewnętrzną osłonę ochronną igły i zachować ją. Jest ona przeznaczona do wielokrotnego użytku.
- Odciągnąć wewnętrzną osłonę ochronną igły i zutylizować ją.

Zewnętrzna osłona ochronna igły


Wewnętrzna osłona ochronna igły

2. Odpowietrzanie

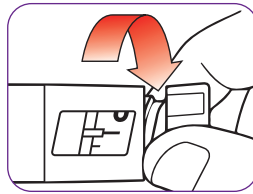


Odpowietrzć Mounjaro® KwikPen®

- Powoli kręcić przyciskiem dozującym do czasu usłyszenia **2 kliknięć** i zobaczenia wydłużonej linii w okienku dozowania. Jest to pozycja odpowietrzania. Można ją korygować, kręcąc gałką dozującą w jednym z dwóch kierunków, aż pozycja odpowietrzania będzie zgodna z pozycją wskaźnika dawki.

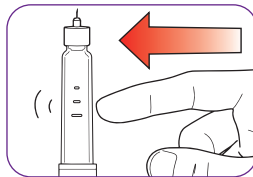


- Trzymać wstrzykiwacz igłą do góry.
- Lekko przechylić uchwyt naboju, aż pęcherzyki powietrza zgromadzą się na wierzchołku.

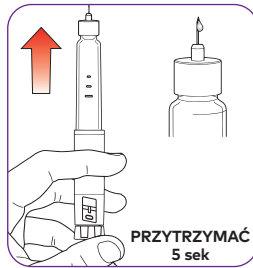


- Wypuścić niewielką ilość produktu leczniczego w powietrze, **dociskając przycisk dozujący do oporu. Powoli policzyć do 5, cały czas trzymając wciśnięty przycisk dozujący.** Symbol **0** musi być widoczny w okienku dozowania. **Nie** wstrzykiwać do ciała.
- Dzięki **odpowietrzeniu** powietrze jest usuwane z naboju, a jednocześnie zapewnione jest prawidłowe działanie wstrzykiwacza. Wstrzykiwacz został odpowietrzony, jeśli niewielka ilość produktu leczniczego wydostaje się z wierzchołka igły wstrzykiwacza.
- Jeżeli produkt leczniczy nie jest widoczny, należy powtórzyć ten krok jeszcze maksymalnie 2 razy.
- Jeżeli wciąż nie widać produktu leczniczego, wymienić igłę wstrzykiwacza i powtórzyć kroki, ale nie więcej niż 1 raz.

3. Wstrzyknięcie

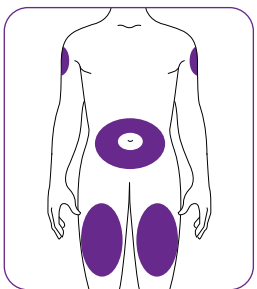


Wybór miejsca wstrzyknięcia

- Produkt leczniczy można wstrzykiwać samodzielnie lub skorzystać z pomocy drugiej osoby. Najlepiej jest wstrzykiwać w udo lub brzuch, co najmniej 5 centymetrów od pępka. Alternatywnie druga osoba może wykonać wstrzyknięcie w tylną stronę ramienia.
- Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać co tydzień. Można wykorzystać ten sam rejon ciała, ale trzeba pamiętać, by wybrać inne miejsce wstrzyknięcia w tym rejonie.

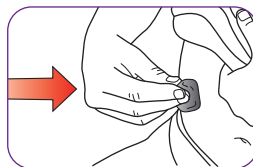


- Jeśli występuje krwawienie po wyciągnięciu igły ze skóry, lekko ucisnąć miejsce wstrzyknięcia wacikiem lub kawałkiem gazy. Nie pocierać tego miejsca.

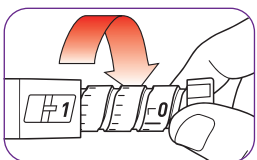


Przekręcić przycisk dozujący

- **Kręcić przyciskiem dozującym aż do jego zatrzymania i pojawienia się symbolu 1** w okienku dozowania. Symbol **1** odpowiada pełnej dawce.

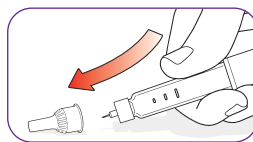


- Ostrożnie ponownie nałożyć zewnętrzną osłonę ochronną igły.

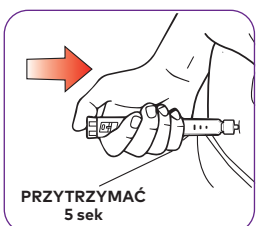


Wstrzyknięcie Mounjaro®

- Wbić igłę w skórę.
- Wstrzyknąć produkt leczniczy, dociskając przycisk dozujący do oporu. Powoli policzyć do 5, cały czas trzymając wciśnięty przycisk dozujący. Symbol **0** musi być widoczny w okienku dozowania przed wyjęciem igły.
- Wyciągnąć igłę ze skóry. Jedna kropla produktu leczniczego na wierzchołku igły to normalne zjawisko. Nie będzie to mieć wpływu na podaną dawkę.

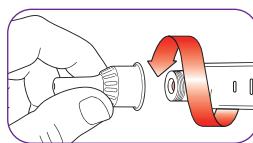

- Wykręcić igłę z założoną zewnętrzną osłoną ochronną i zutylizować igłę, wrzucając ją do pojemnika odpornego na przebicie. Nie przechowywać wstrzykiwacza z założoną igłą, aby uniknąć wypływu, zablokowania igły i wnikięcia powietrza do wstrzykiwacza.

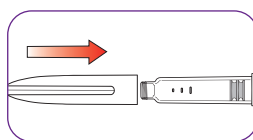

- Nałożyć osłonę ochronną wstrzykiwacza. Nie przechowywać wstrzykiwacza bez założonej osłony ochronnej.

Ważna wskazówka: Do wstrzyknięcia Mounjaro® za pomocą Mounjaro® KwikPen® potrzebne są igły. Zalecenie igły i receptę na nie otrzymasz od swojego lekarza/swojej lekarki.

Kiedy wstrzykiwać?

- Mounjaro® należy przyjmować zawsze tego samego dnia w tygodniu. Pomocne może być ustawienie przypomnienia na dany dzień w telefonie lub kalendarzu.
- W razie potrzeby można zmienić dzień cotygodniowego przyjmowania leku, o ile przerwa między dwiema dawkami wynosi co najmniej 3 dni.

Przechowywanie przed przełamaniami

- Przed pierwszym użyciem należy przechowywać wstrzykiwacz w lodówce w temperaturze od 2 do 8°C.
- Nieprzełamane wstrzykiwacze mogą być użyte przed upływem nadrukowanej na etykiecie daty przydatności.
- Wstrzykiwacza nie wolno zamrażać. Zutyliзовать wstrzykiwacz, jeśli został zamrożony.

Ważna informacja

- Należy przeczytać instrukcję obsługi dołączoną do Mounjaro® KwikPen® i postępować ściśle zgodnie z nią.

Pominięta dawka?

- W przypadku pominięcia dawki należy ją jak najszybciej uzupełnić w ciągu 4 dni od takiego zdarzenia.
- Jeśli minęły więcej niż 4 dni, należy pominąć tę dawkę i podać następną zgodnie z regularnym harmonogramem przyjmowania leku. W każdym wypadku można następnie kontynuować regularne podawanie preparatu 1x w tygodniu.

Przechowywanie po przełamaniu

- Przełamany wstrzykiwacz można przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 30°C.
- Zutyliзовать wstrzykiwacz 30 dni po pierwszym użyciu, także jeśli wciąż znajduje się w nim produkt leczniczy.
- Zutyliзовать wstrzykiwacz po podaniu czwartej dawki tygodniowej.

Utylizacja

- Zutyliзовать zużytą igłę wstrzykiwacza, wrzucając ją do pojemnika odpornego na przekłucie, a Mounjaro® KwikPen® zgodnie z zaleceniami swojego lekarza/swojej lekarki.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

- **Zachęcamy do porozmawiania ze swoim lekarzem/swoją lekarką**
- Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać instrukcję obsługi dołączoną do Mounjaro® KwikPen®.
- Wejdź na stronę www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro lub zeskanuj kod QR „Nasza witryna internetowa”, aby uzyskać więcej informacji na temat leku Mounjaro®.
- Zeskanuj kod QR „Film instruktażowy”, aby obejrzeć film z instrukcją stosowania leku.

Nasza witryna internetowa



Film instruktażowy



Lilly

Niniejsza ulotka jest przeznaczona dla osób, którym przepisano lek Mounjaro®.

1 x wöchentlich
mounjaro[®]
KwikPen[®]
Tirzepatid