



ANWEISUNGEN ZUR
VERABREICHUNG VON

▼ **Mounjaro**[®]
KwikPen[®]
(Tirzepatid)



LillyPlus[™]

Informationsmaterial zur Verwendung des Geräts. Bei Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



▼ Dieses Medikament unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Die Meldung vermuteter Nebenwirkungen im Zusammenhang mit diesem Medikament ist dringend erforderlich.

Referenz: Mounjaro[®]-Datenblatt KwikPen[®] (Tirzepatid). Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/mounjaro-epar-product-information_de.pdf.



Was ist Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid) und wofür wird es verwendet?

Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid) enthält den Wirkstoff Tirzepatid und wird zur Behandlung von Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes mellitus sowie zur Behandlung von Erwachsenen mit Fettleibigkeit oder Übergewicht (mit einem BMI von mindestens 27 kg/m²) und gewichtsbedingten Gesundheitsproblemen angewendet.

Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid) wird in einem Fertigpen namens KwikPen® angeboten.

- Jeder **KwikPen®** enthält 2,4 ml injizierbare Lösung (4 Dosen à 0,6 ml) und einen **Überschuss zum Spülen** für eine vierwöchige Behandlung.



Wie wird Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid) verwendet?

- Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid) wird unter die Haut gespritzt (subkutane Injektion).
- Sie müssen das Medikament jede Woche am gleichen Tag anwenden.
- Sie können dies zu jeder Tageszeit tun, mit oder ohne Essen.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Ärzteteams zur Verabreichung dieses Medikaments.

BMI: Body-Mass-Index.

Referenz: Mounjaro®-Packungsbeilage KwikPen® (Tirzepatid). Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx_162204_de.pdf.


Informationsmaterial zur Gerätenutzung. Bei Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Einige Tipps, die Sie befolgen können:


- Um Ihnen zu helfen, sich daran zu erinnern, wann Sie **Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid)** anwenden müssen, können Sie einen Vermerk in Ihren Kalender eintragen.
- Falls erforderlich, können Sie den Tag Ihrer wöchentlichen **Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid)**-Injektion ändern, sofern seit Ihrer letzten Injektion mindestens 3 Tage vergangen sind. Nachdem Sie einen neuen Dosierungstag ausgewählt haben, fahren Sie mit der wöchentlichen Verabreichung an diesem neuen Tag fort.

- Sie können **Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid)** in Ihren Bauchbereich (Abdomen) mindestens 5 cm von Ihrem Bauchnabel entfernt oder in Ihren Oberschenkel oder Oberarm spritzen.

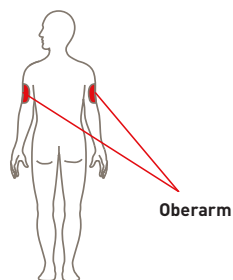

- Möglicherweise benötigen Sie die Hilfe einer anderen Person, um eine Injektion in den Oberarm vorzunehmen.

- Wenn Sie möchten, können Sie sich jede Woche eine Injektion in derselben Körperregion verabreichen. Achten Sie in diesem Fall darauf, unterschiedliche Injektionsstellen innerhalb derselben Region zu wählen.

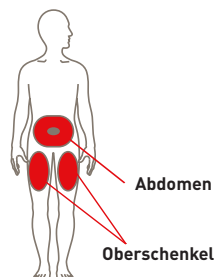


- Wenn Sie auch Insulin spritzen, wählen Sie dafür eine andere Injektionsstelle.

Quellen: Mounjaro®-Packungsbeilage KwikPen® (Tirzepatid). Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx_162204_de.pdf.

Informationsmaterial zur Gerätenutzung. Bei Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Teile des subkutanen Injektionspens

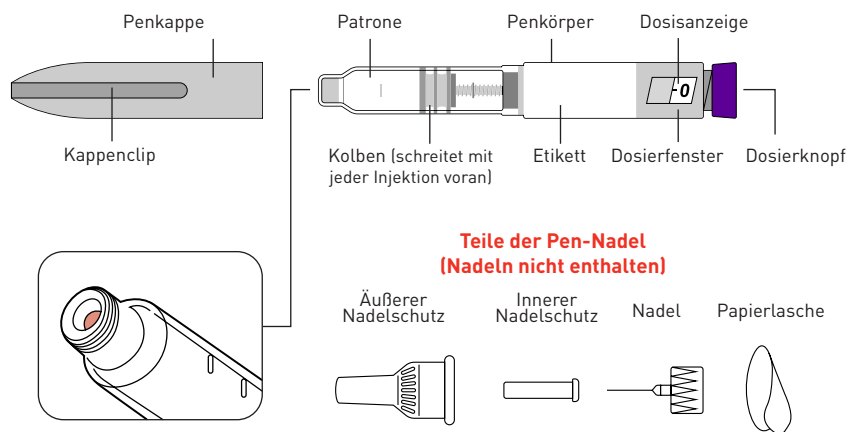

Für die Injektion benötigte Materialien:



Fertigen: Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid).



KwikPen®-kompatible Nadel (Wenn Sie nicht wissen, welche Pen-Nadel Sie verwenden sollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.)



Baumwolltupfer.




Kanülenbehälter oder Hartplastikbehälter mit Sicherheitsverschluss.

Quellen: Gebrauchsanweisung für Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid). Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx_162204_de.pdf.


Informationsmaterial zur Gerätenutzung. Bei Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie wird mit dem Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid) injiziert?


Schritt 1: Bereiten Sie Ihren Pen vor

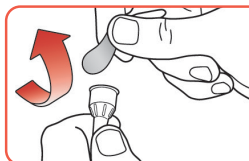


Wählen Sie eine neue Pen-Nadel aus. Verwenden Sie für jede Injektion immer eine neue Nadel.

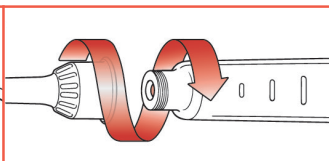

Stecken Sie die Nadel mit der Kappe gerade auf den Pen und drehen Sie sie fest.

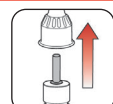


Äußerer Nadelschutz

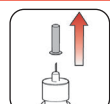


Innerer Nadelschutz

Entfernen Sie den äußeren Nadelschutz. Werfen Sie diesen nicht weg. Entfernen Sie den inneren Schutz und entsorgen Sie ihn.


Schritt 2: Spülen Sie Ihren Pen **Sie müssen Ihren Pen vor jeder Injektion spülen.**

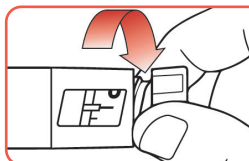

Drehen Sie zum Spülen des Pens den Dosierknopf, bis Sie **2 Klicks** hören und die längliche Linie  im Dosierfenster zu sehen ist.




Halten Sie den Pen mit der Nadel nach oben. Klopfen Sie leicht auf den Patronenhalter, um Luftblasen nach oben zu drücken.

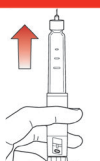


5 Sekunden warten.

Drücken Sie den Dosierknopf ganz hinein, bis im Dosierfenster „0“ erscheint. Halten Sie dann den Dosierknopf gedrückt und zählen Sie langsam bis 5.


Schritt 3: Injektion der Dosis

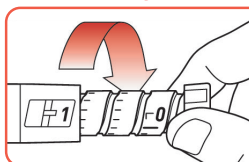


Drehen Sie den Dosierknopf bis zum Anschlag, bis das Symbol  im Dosierfenster erscheint.

Das Symbol  entspricht einer vollständigen Dosis.



Injizieren Sie das Medikament, indem Sie **den Dosierknopf bis zum Anschlag hineindrücken und dann langsam bis 5 zählen, während Sie den Dosierknopf gedrückt halten**. Das Symbol  muss im Dosierfenster erscheinen, bevor Sie die Nadel entfernen.

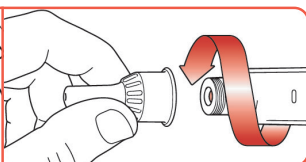

Setzen Sie den äußeren Nadelschutz vorsichtig wieder auf. Schrauben Sie die Kappe der Nadel ab und legen Sie sie in einen Kanülenbehälter.

Quellen: Gebrauchsanweisung für Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid). Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx_162204_de.pdf.

Informationsmaterial zur Gerätenutzung. Bei Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Aufbewahrung der Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid)-Pens:

Unbenutzte Pens:



Bewahren Sie sie im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C auf.



Unbenutzte Pens können bis zu dem auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum verwendet werden, wenn sie im Kühlschrank aufbewahrt wurden.



Frieren Sie den Pen NICHT ein. Entsorgen Sie den Pen, wenn er gefroren ist.

Gebrauchte Pens:



Sie können Ihren gebrauchten Pen nach der Injektion bei Raumtemperatur unter 30 °C aufbewahren.



Bewahren Sie Pen und Nadeln außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern auf.



Entsorgen Sie den Pen 30 Tage nach der ersten Anwendung, da das Medikament nach dieser Zeit möglicherweise nicht mehr wirksam ist.



Entsorgen Sie den Pen nach Verabreichung von 4 wöchentlichen Dosen. Es ist normal, dass nach der Verabreichung der vier Dosen mit der entsprechenden Spülung etwas Flüssigkeit im Pen verbleibt.

Quellen: Informationen erstellt aus Daten des technischen Datenblatts von Mounjaro® KwikPen® (Tirzepatid) https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/mounjaro-epar-product-information_de.pdf und Mounjaro®-Packungsbeilage KwikPen® (Tirzepatid) https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1221685051/P_1221685051.html.


Informationsmaterial zur Gerätenutzung. Bei Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Medikamentenreste:



Nach Abschluss der vierten Injektion werden Sie feststellen, dass noch etwas Medikament übrig ist, was normal ist. Dieses übrig gebliebene Medikament stellt sicher, dass der Pen ordnungsgemäß funktioniert.

- Entsorgen Sie den Pen.
- Auch wenn sich noch Medikament im Pen befindet, versuchen Sie nicht, das restliche Medikament zu injizieren. Wenn Sie versuchen, das übrig gebliebene Medikament zu injizieren, erhalten Sie möglicherweise eine unvollständige Dosis.

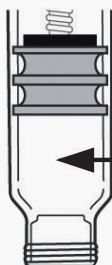

Übrig gebliebene
Medikamente
(keine Dosis)

Weitere Informationen:

- Verwenden Sie dieses Medikament nicht nach dem auf dem Etikett und der Verpackung angegebenen Verfallsdatum.
- Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.
- Verwenden Sie dieses Medikament nicht, wenn Sie feststellen, dass der Pen beschädigt ist oder das Medikament trüb oder verfärbt ist oder Partikel enthält.



Quellen: Mounjaro®-Packungsbeilage KwikPen® (Tirzepatid). Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx_162204_de.pdf.

Informationsmaterial zur Gerätenutzung. Bei Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Jetzt
sind Sie bereit für
den Beginn Ihrer
Behandlung mit
Mounjaro[®]
KwikPen[®]
(Tirzepatid)



Hier finden Sie weitere
Informationen:



Scannen Sie diesen QR-Code, um auf einen Leitfaden zuzugreifen,
der Sie bei Ihrer Behandlung unterstützt.

Wenden Sie sich an Ihr Ärzteteam.

Denken Sie daran, die Packungsbeilage zu lesen und die
Anweisungen zur Anwendung dieses Medikaments zu befolgen.



LillyPlus[™]

PP-0B-ES-0627

Referenz: Mounjaro[®]-Datenblatt KwikPen[®] [Tirzepatid]. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/mounjaro-epar-product-information_de.pdf.

Informationsmaterial zur Gerätenutzung. Bei Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.