

## Ab Dezember 2025: Der angepasste Mounjaro® KwikPen® ist verfügbar

### Warum macht Lilly technische Anpassungen beim Mounjaro® KwikPen®?

Der Mounjaro® KwikPen® ist (Stand Oktober 2025) mit 3,2 ml Wirkstoff gefüllt. Nach dem korrekten Entlüften und der Anwendung von vier vollen Dosen bleibt eine geringe Restmenge im Pen zurück. Diese Restmenge entspricht keiner vollständigen Dosis mehr und kann nicht mehr appliziert werden, da der Pen automatisch sperrt. Diese Situation hat wiederholt zu Verunsicherung und Rückfragen geführt.

Um die Anwendungsfreundlichkeit weiter zu verbessern und Missverständnisse zu vermeiden, wurde das Design des Pens überarbeitet. **Durch eine optimierte Füllmenge und dank kleiner technischer Anpassungen wird künftig keine vermeintliche „Restdosis“ mehr sichtbar sein.** So möchten wir die Anwendung noch klarer und sicherer gestalten.

### Was ist neu?

- **Verlängerter Kolben:** Eine Komponente aus schwarzem Kunststoff wurde hinter dem Kolben hinzugefügt. Dadurch wird der Kolben „verlängert“. Dies wird im Abschnitt „Teile des Mounjaro® KwikPen®“ der Bedienungsanleitung des Pens gezeigt.
- **Veränderte Kolbenposition:** Der Kolben sitzt vor dem ersten Gebrauch deutlich sichtbar weiter unten in der Patrone.
- **Geringere Füllmenge und geringere Restmenge:** Statt 3,2 ml enthält der Pen nun 2,7 ml Wirkstoff. Nach der vierten Dosis befindet sich der Kolben nahe dem Patronenboden und zeigt nun deutlich an, dass der Pen aufgebraucht ist und entsorgt werden kann.

### Was bleibt gleich?

- Die Funktionalität des KwikPen® bleibt erhalten.
- Es sind weiterhin 4 volle Dosen sowie Arzneimittel für die Entlüftung im KwikPen® enthalten.
- Der Preis bleibt ebenfalls unverändert.

**Sie können den  
KwikPen® wie  
gewohnt bedienen!**

### Wann sind die ersten angepassten KwikPen® in Österreich verfügbar?

- Die ersten angepassten KwikPen® werden **im Dezember 2025** in österreichischen Apotheken erhältlich sein.
- Es wird eine **Übergangszeit mit beiden Versionen des KwikPen®** geben: In diesem Zeitraum werden sowohl der ursprüngliche, als auch der angepasste KwikPen® in Apotheken verfügbar sein: Es kann vorkommen, dass Sie beim Einlösen Ihres Rezepts entweder die eine oder die andere Version erhalten.

#### WICHTIGE INFO:

Sollten Sie Bedenken haben, ob Ihr Mounjaro® KwikPen® eine Fälschung sein könnte, kontaktieren Sie uns:

**Telefon: 01/ 206 09 1270**  
**E-Mail: medservices@lilly.com**

#### Für medizinisches Fachpersonal relevant:




**FACHINFO  
MOUNJARO®**

Die Fachinformationen aller von Eli Lilly in Österreich zugelassenen Arzneimittel können abgerufen werden unter [www.lilly.at/fis](http://www.lilly.at/fis)

**ANGEPASSTER KwikPen® mit 2,7 ml –  
Geringere Füllmenge und geringere Restmenge:**

**Unangebrochener Pen**

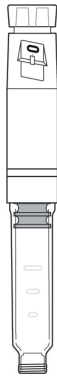

**Komponente**



**Ursprünglicher  
Mounjaro® KwikPen®**

**Angepasster  
Mounjaro® KwikPen®**

Verwenden Sie die Linien auf der Patrone nicht als Dosisanzeige.

**Nach der Abgabe von 4 festen Dosen**

**Ungefähre Kolbenposition nach Abgabe der 4. Dosis**

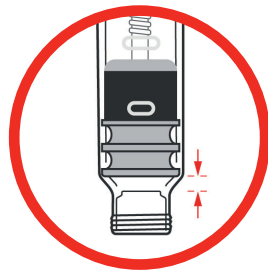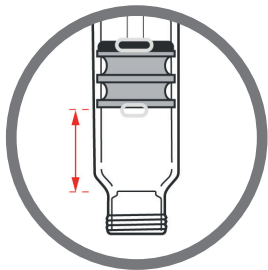

**Ursprünglicher  
Mounjaro® KwikPen®**  
Verbleibendes Arzneimittel  
(keine Dosis)

**Angepasster  
Mounjaro® KwikPen®**  
Verbleibendes Arzneimittel  
(keine Dosis)

**Wie sieht der KwikPen® mit 2,7 ml während  
der Verabreichung der 4 sachgemäßen Dosen aus?**

**Ursprünglicher Mounjaro® KwikPen®**



**Kolbenposition  
vor der  
Anwendung**

**Kolbenposition  
nach der  
1. Dosis**

**Kolbenposition  
nach der  
2. Dosis**

**Kolbenposition  
nach der  
3. Dosis**

**Kolbenposition  
nach der  
4./letzten Dosis**

**Angepasster Mounjaro® KwikPen®**



**Kolbenposition  
vor der  
Anwendung**

**Kolbenposition  
nach der  
1. Dosis**

**Kolbenposition  
nach der  
2. Dosis**

**Kolbenposition  
nach der  
3. Dosis**

**Kolbenposition  
nach der  
4./letzten Dosis**

Die Abbildungen zeigen die ungefähre Position des Kolbens.  
Verwenden Sie die Linien auf der Patrone nicht als Dosisanzeige.