


BELANGRIJKE INFORMATIE

betreffende insuline pennen (HumaPen Savvio®, Humalog KwikPen® en Lyumjev KwikPen®):

- De naald moet vervangen worden bij elke injectie (want een naald die meerdere keren gebruikt wordt, kan verstopen).
- De naald mag nooit bevestigd blijven op de pen tussen twee injecties.
- De pen mag niet bewaard worden in de koelkast eens in gebruik, en zeker niet met een naald erop bevestigd.
- De pen moet ontluicht worden zoals hieronder afgebeeld:

Het kan zijn dat een nieuw patroon verscheidene keren moet worden ontluicht voordat u insuline op het punt van de naald ziet.

Stel 2 eenheden in.

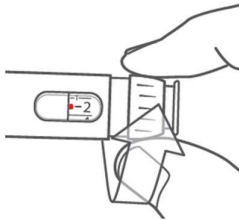


Houd de pen recht omhoog. Tik tegen het patroon zodat de lucht zich bovenin verzamelt voor verwijdering.



Druk op de injectieknop en houd deze 5 seconden ingedrukt. Controleer of er insuline op de punt van de naald zit. Ontluicht de pen opnieuw als er geen insuline zichtbaar is.

⚠ Als u niet ontluicht dan kunt u de verkeerde dosis krijgen.

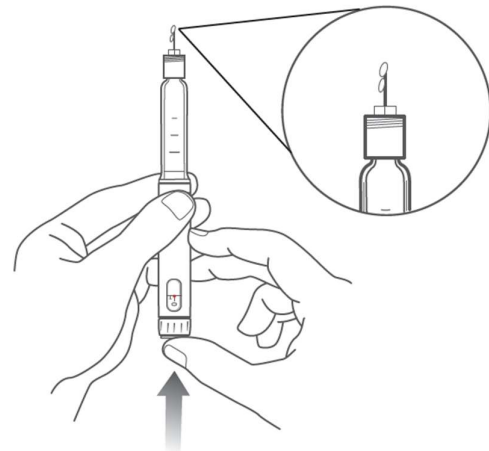

⚠ Als er na verscheidene malen ontluichten nog geen insuline te zien is, dan kan de naald verstopt zijn. Bevestig een nieuwe naald en herhaal de ontluichtingsstappen.

Het naleven van deze vier regels helpt om de meeste problemen op te lossen. Als het probleem ondanks het naleven van deze regels blijft bestaan, neem dan contact met ons op via +32 (0)2 548 84 94.