



Применение Mounjaro® KwikPen® и другая важная информация в кратком обзоре

Все действия необходимо выполнять при каждой инъекции!

1. Подготовка


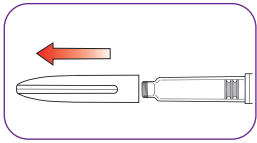


Снимите защитный колпачок шприца-ручки и проверьте шприц-ручку и этикетку.

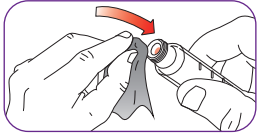

Возьмите новую иглу для шприца-ручки

- Протрите красное внутреннее уплотнение тампоном.
- Всегда используйте новую иглу для шприца-ручки для каждой инъекции, чтобы избежать инфекций и засоренных игл.
- Удалите защитную бумагу с наружного защитного колпачка иглы.

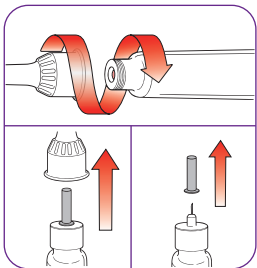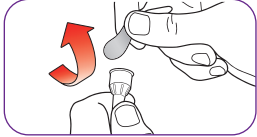


Наружный защитный колпачок иглы

Внутренний защитный колпачок иглы


- Нажмите на шприц-ручку иглой с защитным колпачком вертикально и поворачивайте иглу до тех пор, пока она не будет плотно держаться.
- Снимите наружный защитный колпачок иглы и сохраните его. Он будет использоваться повторно.
- Снимите внутренний защитный колпачок иглы и утилизируйте его.

2. Выпускание воздуха

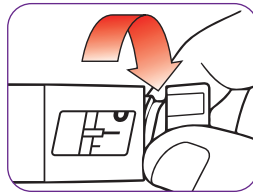

Выпустите воздух из шприца-ручки Mounjaro® KwikPen®

- Медленно поворачивайте ручку дозирования до тех пор, пока не услышите **2 щелчка**, и в окне дозирования не появится расширенная линия. Это положение выпуска воздуха. Его можно исправить, поворачивая кнопку дозирования в любом направлении до тех пор, пока положение выпуска воздуха не совпадет с отображением дозы.

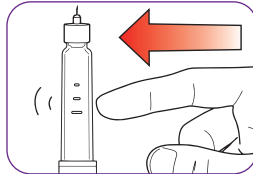


- Держите шприц-ручку иглой вверх.
- Слегка постучите по держателю картриджа, чтобы на кончике собрались пузырьки воздуха.



5 сек. УДЕРЖИВАТЬ


- Выпустите немного лекарственного средства в воздух, **нажав кнопку дозирования до упора. Затем медленно сосчитайте до 5, удерживая кнопку дозирования.** В окне дозирования должен появиться символ **0**. **Не** делать инъекцию в туловище.
- Процедура **выпуска воздуха** удаляет воздух из картриджа и обеспечивает надлежащую работу шприца-ручки. Воздух вышел из шприца-ручки, если небольшое количество лекарственного препарата выделилось из кончика иглы шприца-ручки.
- Если Вы не видите лекарственный препарат, повторите этот этап, но не более 2 раз.
- Если Вы по-прежнему не видите лекарственный препарат, замените иглу шприца-ручки и повторите действия, но не более 1 раза.

3. Инъекция

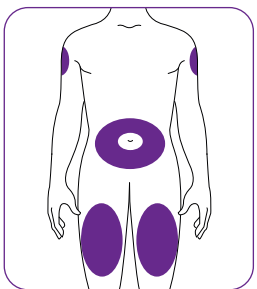


Выберите место для инъекции

- Вводить лекарственный препарат самостоятельно или с посторонней помощью следует, предпочтительно, в бедро или живот на расстоянии не менее 5 сантиметров от пупка. Или же другой человек может сделать Вам инъекцию в заднюю часть плеча.
- Чередуйте места инъекций каждую неделю. Можно использовать тот же участок тела, но обязательно выберите другое место инъекции на этой части тела.

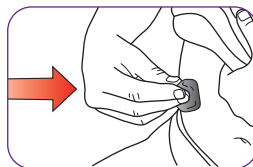


- Если после извлечения иглы из кожи появилось кровотечение, слегка прижмите место инъекции тампоном или куском марлевого бинта. Не трите место укола.
- Убедитесь, что символ **0** находится в окне дозирования. Если в окошке отображается символ **0**, значит, введена полная доза. Если в окне дозирования не отображается символ **0**, снова вставьте иглу в кожу и завершите инъекцию. Не меняйте настройку дозы. Если Вы все еще считаете, что не получили полную дозу, не повторяйте процедуру инъекции сначала. Обратитесь в свой филиал компании Lilly, указанный в листке-вкладыше.

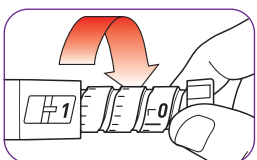


Поверните кнопку дозирования

- **Поворачивайте ручку дозирования до упора, пока в окне дозирования не появится символ 1.** Символ **1** соответствует полной дозе.

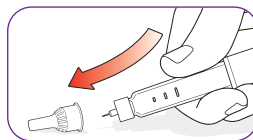


- Снова осторожно наденьте наружный защитный колпачок иглы.

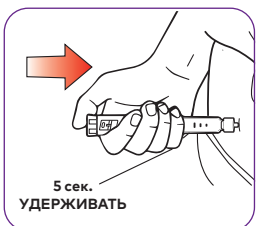


5 сек. УДЕРЖИВАТЬ

Сделайте инъекцию Mounjaro®

- Введите иглу в кожу.
- Введите лекарственное средство, нажав кнопку дозирования до упора. Затем медленно сосчитайте до 5, удерживая кнопку дозирования. В окне дозирования должен появиться символ **0**, затем можно вывести иглу.
- Извлеките из кожи. Капля лекарственного препарата на кончике иглы — это нормально. Это не повлияет на дозу.

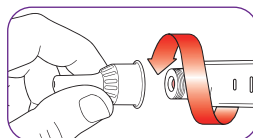

- Отвинтите иглу с надетым наружным защитным колпачком и выбросьте иглу в непрокальваемую упаковку. Чтобы предотвратить утечку лекарственного препарата, засорение иглы и попадание воздуха в шприц-ручку, не храните шприц-ручку с прикрепленной иглой.

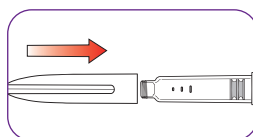

- Снова наденьте защитный колпачок для шприца-ручки. Не храните шприц-ручку без надетого защитного колпачка.

Важное примечание. Для инъекции препарата Mounjaro® с помощью Mounjaro® KwikPen® используются иглы. Рекомендации по выбору игл и рецепт на них можно получить у лечащего врача.

Когда делать инъекцию?

- Принимайте препарат Mounjaro® всегда в один и тот же день недели. Вы можете помочь себе, установив на этот день напоминание в телефоне или календаре.
- При необходимости день еженедельного введения можно изменить при условии, что интервал между двумя дозами составляет не менее 3 дней.

Хранение до момента вскрытия

- Перед первым использованием храните шприц-ручку в холодильнике при температуре от 2 °C до 8 °C.
- Нераспечатанные шприцы-ручки можно использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке.
- Не подвергайте шприцы-ручки заморозке. Утилизируйте шприц-ручку, если она была заморожена.

Важно!

- Обязательно прочитайте и следуйте инструкциям, прилагаемым к Вашему Mounjaro® KwikPen®.

Вы пропустили очередную дозу?

- В случае пропуска дозы ее следует ввести как можно скорее в течение 4 дней после пропуска дозы.
- Если с момента пропуска прошло больше 4 дней, не вводите пропущенную дозу, а сделайте следующую инъекцию в установленный день по графику. В любом случае Вы можете продолжить прием обычной дозы один раз в неделю.

Хранение после вскрытия

- Вы можете хранить свою распакованную шприц-ручку при комнатной температуре ниже 30 °C.
- Утилизируйте шприц-ручку через 30 дней после первого использования, даже если в ней еще осталось лекарственное средство.
- Утилизируйте шприц-ручку после введения четвертой еженедельной дозы.

Утилизация

- Утилизируйте использованные иглы для шприцов-ручек в защищенной от проколов упаковке и Mounjaro® KwikPen® в соответствии с инструкциями лечащего врача.

Здесь Вы можете узнать больше:

- **Проконсультируйтесь со своим врачом.**
- Для получения дополнительной информации прочтите инструкцию по использованию, прилагаемую к Вашей шприц-ручке Mounjaro® KwikPen®.
- Посетите www.lilly-pathient.de/de-de/mounjaro или отсканируйте QR-код «Перейти на веб-сайт», чтобы получить дополнительную информацию о Mounjaro®.
- Отсканируйте QR-код «Видео о применении», чтобы просмотреть видео о применении.

На веб-сайт



Видео о применении



Lilly

Этот листок-вкладыш предназначен для тех людей, кому был прописан препарат Mounjaro®.

1 x wöchentlich
mounjaro[®]
KwikPen[®]
Tirzepatid