



# Der Mounjaro® KwikPen® – Die Anwendung und weitere wichtige Informationen im Überblick


## 1. Vorbereiten

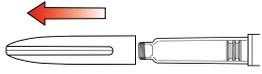


- Pen-Schutzkappe gerade abziehen
- Überprüfung Pen, Dosisstärke und Verfallsdatum

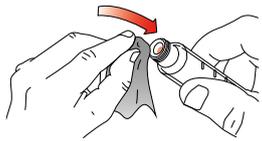

- Rote Innendichtung mit einem Alkohol-Tupfer abwischen

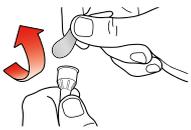

- Neue Pen-Nadel verwenden
- Schutzpapier entfernen

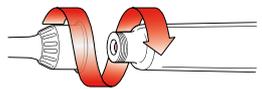


- Mit Schutzkappe versehene Nadel **senkrecht auf den Pen drücken**


- Nadel drehen, bis sie **fest sitzt**

- **Äußere Nadelschutzkappe abziehen und aufbewahren.** Sie wird wiederverwendet

- **Innere Nadelschutzkappe abziehen und entsorgen**

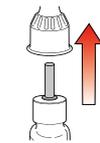


Äußere Nadelschutzkappe

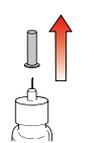


Innere Nadelschutzkappe

## 2. Entlüften

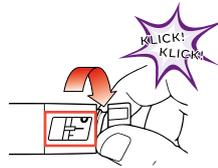

- Dosierknopf drehen, bis **2 Klicks** zu hören sind
- Verlängerte Linie muss sichtbar sein. Das ist die **Entlüftungs-Position**
- Korrektur der Entlüftungsposition: Dosierknopf kann in **beide Richtungen** gedreht werden

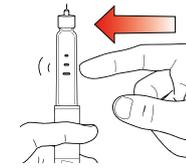

- Pen mit Nadel nach oben halten
- Patronenhalter leicht antippen, damit sich Luftblasen an der Spitze sammeln
- Dosierknopf **bis zum Anschlag durchdrücken**, um etwas Arzneimittel in die Luft abzugeben
- Dosierknopf gedrückt halten und **bis 5 zählen**
- Die **0** muss im Dosierfenster angezeigt werden. Nicht in den Körper injizieren

- **Entlüften** stellt sicher, dass die Luft aus der Patrone entfernt wird

- Pen ist entlüftet, wenn **eine kleine Menge** des Arzneimittels aus der Pen-Nadel **austritt**


### • Bitte beachten:

Je Pen max. **8 Entlüftungsvorgänge!** Übermäßiges Entlüften kann zu einer **Blockade des Pens** vor der 4. (letzten) Injektion führen


- **Kein Arzneimittel zu sehen:** Schritt wiederholen (nicht mehr als zwei weitere Male)

- **Noch immer kein Arzneimittel zu sehen:** Wechsel der Pen-Nadel und Schritt wiederholen (nicht mehr als ein weiteres Mal)


- **Noch immer kein Arzneimittel zu sehen:** Lilly Niederlassung kontaktieren (in Packungsbeilage aufgeführt)

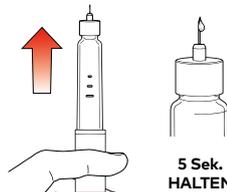


5 Sek. HALTEN

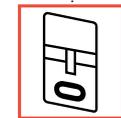


## 3. Injizieren

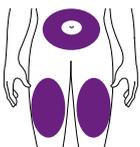

- Oberschenkel oder Bauch
- Mind. **5 Zentimeter** vom Bauchnabel entfernt
- Injektionsstelle **wöchentlich** wechseln

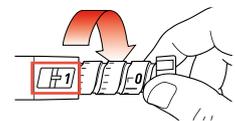

- Dosierknopf drehen, bis er stoppt und die **1** im Dosierfenster sichtbar ist
- Die **1** entspricht einer **vollen Dosis**

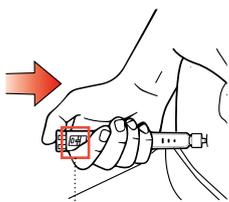

- Nadel in die Haut stechen
- Dosierknopf **bis zum Anschlag** durchdrücken (Arzneimittel injizieren)
- Dosierknopf **gedrückt halten** und **langsam bis 5 zählen**
- Sobald die **0** im Dosierfenster sichtbar ist, ist die Dosis **vollständig injiziert**
- **Nadel aus der Haut ziehen.** Ein Tropfen des Arzneimittels auf der Nadelspitze ist normal. Dieser wird die Dosis **nicht beeinflussen**
- Ist die **0** im Dosierfenster **sichtbar**, wurde die Dosis vollständig erhalten
- Ist die **0 nicht** im Dosierfenster **zu sehen**, Nadel erneut in die Haut stechen und die Injektion beenden
- Einstellung der Dosis **NICHT verändern**
- Falls weiterhin der Eindruck besteht, die Dosis **nicht vollständig** erhalten zu haben – **KEINE** erneute Injektion
- Lilly Niederlassung kontaktieren (s. Packungsbeilage)



5 Sek. HALTEN




- Sollte Blut sichtbar sein, mit einem Tupfer leicht auf die Injektionsstelle drücken – **NICHT reiben**



- **Äußere Nadelschutzkappe** vorsichtig aufsetzen



- Nadel mit **aufgesetzter äußerer Nadelschutzkappe** abschrauben
- Pen **NIE** mit aufgesteckter Nadel aufbewahren, um:
  - Auslaufen,
  - Verstopfen,
  - Eintritt von Luft in den Pen zu verhindern

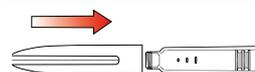

- Schutzkappe aufsetzen
- Pen **NIE** ohne aufgesetzte Schutzkappe aufbewahren

**Wichtiger Hinweis:** Für die Injektion von Mounjaro® mit dem Mounjaro® KwikPen® werden Nadeln benötigt. Die Nadelempfehlung sowie das Rezept dafür stellt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt aus.

### Wann spritzen?

- Mounjaro® immer am gleichen Tag der Woche einnehmen. Tipp: Erinnerung im Telefon oder Kalender für diesen Tag einstellen
- Der Tag der wöchentlichen Gabe kann geändert werden, solange der Zeitraum zwischen zwei Dosen mindestens 3 Tage beträgt

### Dosis verpasst?

- Die Gabe so schnell wie möglich innerhalb von 4 Tagen nach der versäumten Dosis nachholen
- Sind mehr als 4 Tage vergangen:
  - vergessene Dosis überspringen
  - nächste Dosis am regulär geplanten Tag verabreichen
  - mit der regelmäßigen, 1x wöchentlichen Gabe fortfahren

### Lagerung vor Anbruch

- Pen vor dem ersten Gebrauch im Kühlschrank zwischen 2 °C und 8 °C aufbewahren
- Unangebrochene Pens können bis zum Ablauf des Verfalldatums angewendet werden
- Pen niemals einfrieren. Pen entsorgen, falls er versehentlich eingefroren war

### Lagerung nach Anbruch

- Angebrochener Pen kann bei Raumtemperatur unter 30 °C aufbewahrt werden
- Pen 30 Tage nach dem ersten Gebrauch entsorgen, auch wenn sich noch Arzneimittel im Pen befindet
- Pen nach Gabe der vierten Wochen-Dosis entsorgen

### Restmenge im Mounjaro® KwikPen® nach der 4. Injektion

- Nach 4. Dosis verbleibt ein Arzneimittelrest
- Arzneimittelrest entspricht keiner vollen Dosis und sollte nicht injiziert werden
- Pen muss mit Arzneimittelrest nach der 4. (letzten) Dosis entsorgt werden



Restmenge

### Entsorgung

- Gebrauchte Pen-Nadeln: durchstechsicherer Behälter
- Mounjaro® KwikPen®: gemäß Anweisungen der Ärztin/des Arztes

**Wichtig:** Die Gebrauchsinformation, die dem Mounjaro® KwikPen® beiliegt, unbedingt lesen und befolgen.

## Mehr erfahren:

Praxisteams sind erste Ansprechpartner

Weiterführende Informationen finden sich in der **Gebrauchsinformation**, die dem Mounjaro® KwikPen® beiliegt oder einfach QR-Code scannen



Zur Gebrauchsinformation

[www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro](http://www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro) aufrufen oder den QR-Code scannen



Zur Website

Scan des QR-Codes führt zur detaillierten **Anleitung** der Verwendung des Mounjaro® KwikPen®



Zum Anwendungsvideo