

Der modifizierte Mounjaro® KwikPen®




- Verbesserte Anwenderfreundlichkeit durch technische Anpassungen und optimierte Füllmenge
- Unveränderte Handhabung
- Unveränderte pharmazeutische Zentralnummern (PZN)
- stufenweise Einführung: Beide KwikPen® Versionen werden in der Übergangszeit in Apotheken erhältlich sein


Was ist neu?

Durch Verlängerung des Kolbens wird das Ende der Patrone nach Applikation der vierten und letzten Dosis erreicht. Es ist keine relevante Restmenge mehr enthalten.

Ursprünglicher Mounjaro® (Tirzepatid) KwikPen®

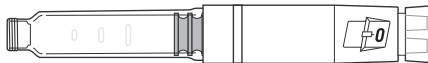


Ungefähre Kolbenposition nach Abgabe der 4 festgelegten Dosen

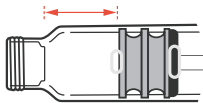


Verbleibendes Arzneimittel
(entspricht keiner Dosis)

Modifizierter Mounjaro® (Tirzepatid) KwikPen®

verlängerter Kolben

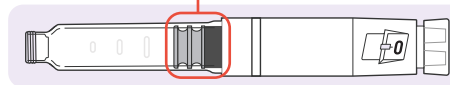


Ungefähre Kolbenposition nach Abgabe der 4 festgelegten Dosen

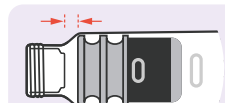


Verbleibendes Arzneimittel
(entspricht keiner Dosis)


Die Anwendung: Mounjaro® KwikPen®¹

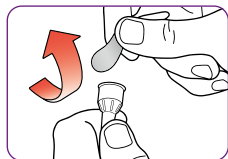


- 1.**
Vorbereiten
des Pens und
Aufsetzen
der Nadel

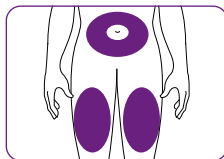


- 4.**
Wahl der
Injektions-
stelle

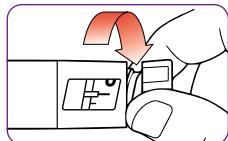


- 2.**
Einstellen der
Entlüftungs-
position

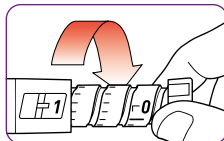


- 5.**
Einstellen
des Pens bis
zur Zahl 1

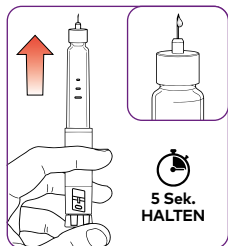

- 3.**
Entlüften
des Pens

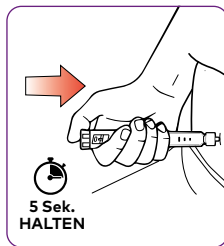

- 6.**
Injektion von
Mounjaro®

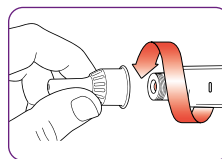

- 7.**
Entsorgen der
Pen-Nadel und
Pen-Schutzkappe
wieder aufsetzen

Bitte beachten:

- **Je Pen max. 8 Entlüftungsvorgänge!**
Übermäßiges Entlüften kann zu einer Blockade des Pens vor der 4. (letzten) Injektion führen.

Detaillierte Informationen zur **Anwendung, Dosierung und Lagerung** des Mounjaro® KwikPen® finden Sie in der aktuellen Fachinformation.



Zur Fachinformation
von Mounjaro®:
[www.lilly.com/de/
fachinfo/mounjaro](http://www.lilly.com/de/fachinfo/mounjaro)

1. Fachinformation Mounjaro®, aktueller Stand.

www.lilly.com/de

Video ansehen

Erfahren Sie im **Anwendungsvideo**
mehr über den Mounjaro® KwikPen® –
einfach den QR-Code scannen!



Fragen zu Mounjaro®?

@ med_info@lilly.com
🌐 www.lillymedical.de



Lilly
A MEDICINE COMPANY