




1. التحضير

اسحب غطاء حماية القلم بشكل مستقيم وتحقق من القلم والملصق.


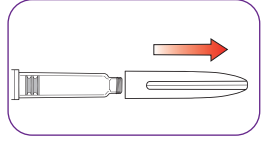


احصل على إبرة قلم جديدة

- امسح الختم الداخلي الأحمر بماسحة.
- استخدم دائمًا إبرة قلم جديدة لكل حقنة لتجنب الالتهابات والإبر المسودة.
- احصل على إبرة قلم جديدة وقم بإزالة الورقة الواقية من غطاء الإبرة الواقي الخارجي.

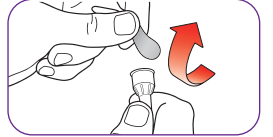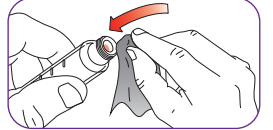

- اضغط بالغطاء الواقي للإبرة المعنية عموديًا على القلم ولف الإبرة حتى تعلق.
- قم بإزالة غطاء الإبرة الواقي الخارجي واحتفظ به.
- سيتم إعادة استخدامه.
- قم بإزالة غطاء الإبرة الواقي الداخلي وتخلص منه.

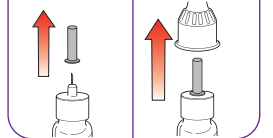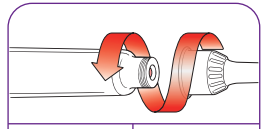


غطاء إبرة واقي- داخلي
غطاء إبرة واقي- خارجي

2. تفريغ الهواء


فَرِّغِ الهواء من Mounjaro® KwikPen®

- اقلب مقبض الجرعات ببطء حتى تسمع نقرتين ويتم عرض الخط الممتد في منطقة الجرعات. هذا هو موضع التفريغ. يمكن تصحيحه عن طريق قلب مقبض الجرعات في أي من الاتجاهين حتى يتطابق وضع التفريغ مع مؤشر الجرعة.

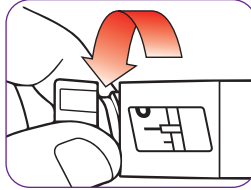


- أمسك القلم مع توجيه الإبرة لأعلى.

- اضغط برفق على حامل الخرطوشة لتجميع فقاعات الهواء عند الطرف.

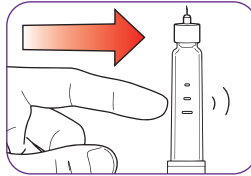

- أطلق بعض الدواء في الهواء عن طريق الضغط على مقبض الجرعات حتى يتوقف. ثم عد ببطء إلى 5 في أثناء الضغط على مقبض الجرعات. يجب [0] عرض الرمز في منطقة الجرعات. لاتحقق في الجسم.
- يزيل التفريغ الهواء من الخرطوشة ويضمن عمل قلمك بشكل صحيح. تم تفريغ قلمك عندما تسربت كمية صغيرة من الدواء من طرف إبرة القلم.
- إذا كنت لا ترى أي دواء، فلا تكرر هذه الخطوة أكثر من مرتين أخريتين.
- إذا كنت لا تزال لا ترى أي دواء، فقم بتغيير إبرة القلم وكرر الخطوات، ولكن ليس أكثر من مرة أخرى.

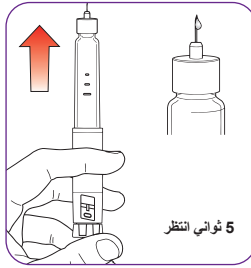


5 ثواني انتظر

3. الحقن


اختر موضع الحقن

- يمكنك أنت أو أي شخص آخر حقن الدواء ويفضل أن يكون في فخذك أو معدتك (البطن)، على بعد 5 سنتيمترات على الأقل من السرة. بدلاً من ذلك، يمكن للشخص الآخر أن يعطيك الحقنة في الجزء الخلفي من العنق الخاص بك.
- قم بتغيير موقع الحقن الخاص بك كل أسبوع. يمكنك استخدام نفس المنطقة من الجسم، ولكن تأكد من اختيار موقع حقن مختلف في منطقة الجسم.

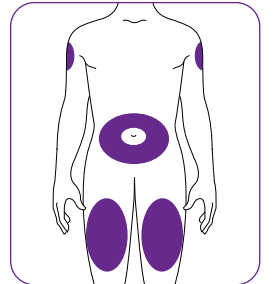


اقلب مقبض الجرعات

- اقلب مقبض الجرعات حتى يتوقف ويظهر الرمز [1] في منطقة الجرعات، ويتوافق الرمز [1] مع جرعة كاملة.

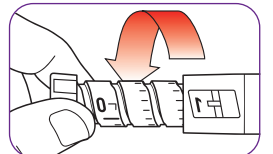


احقن دواء Mounjaro®

- أدخل الإبرة في جلدك.
- احقن الدواء بالضغط على مقبض الجرعات حتى التوقف. ثم عد ببطء إلى 5 في أثناء الضغط على مقبض الجرعات. يجب [0] عرض الرمز في منطقة الجرعات قبل إزالة الإبرة.
- اسحب الإبرة من الجلد. وجود قطرة من الدواء على طرف الإبرة هو أمر طبيعي. هذا لن يؤثر على جرعتك.

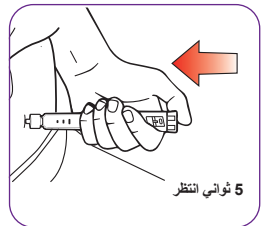


5 ثواني انتظر


- استبدل بعناية غطاء الإبرة الواقي الخارجي.

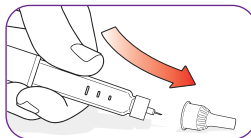

- افصل الإبرة من غطاء الإبرة الواقي الخارجيمتصل وتخلص من الإبرة في وعاء مقاوم للثقوب. لا تخزن القلم بالإبرة المثبتة لمنع التسرب وانسداد الإبرة ودخول الهواء إلى القلم.

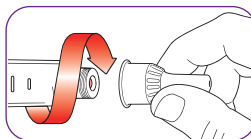

- استبدل غطاء القلم الواقي. لا تخزن القلم بدون غطاء القلم الواقي المرفق.

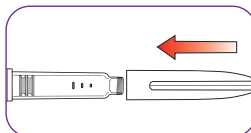

ملاحظة مهمة: تحتاج إلى إبر لحقن Mounjaro® باستخدام KwikPen®. ستتلقى توصية الإبرة والوصفة الطبية من طبيبك.

متى يتم الحقن؟

- احرص دائمًا على استخدام Mounjaro® في نفس اليوم من الأسبوع. وقد يساعدك ضبط تنكير في الهاتف أو التقويم لهذا اليوم.
- ويمكن تغيير يوم الجرعة الأسبوعية حسب اللزوم، طالما أن الفترة بين الجرعتين لا تقل عن 3 أيام.

هل فاتتك جرعة؟

- في حالة نسيان إحدى الجرعات، يجب تناول هذه الجرعة في أقرب وقت ممكن خلال 4 أيام من وقت نسيانها.
- إذا انقضى أكثر من 4 أيام، فيجب تخطي الجرعة المنسية وتناول الجرعة التالية بشكل منتظم في اليوم المخطط له. وبأي حال من الأحوال يمكنك بعد ذلك مواصلة تناول الجرعة الأسبوعية العادية بانتظام مرة واحدة.

التخزين قبل الفتح

- يُرجى تخزين القلم في الثلاجة لأول مرة بين 2 درجة مئوية و 8 درجات مئوية.
- يمكن استخدام الأقلام غير المفتوحة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الملصق.
- يُحظر تجميد الأقلام. تخلص من القلم عندما يتم تجميده.

التخزين بعد الفتح

- يمكنك تخزين قلمك المفتوح في درجة حرارة الغرفة أقل من 30 درجة مئوية.
- تخلص من القلم بعد 30 يومًا من الاستخدام الأول حتى لو كان هناك دواء في القلم.
- تخلص من القلم بعد إعطاء جرعة الأسبوع الرابع.

مهم

- احرص على قراءة تعليمات الاستخدام المرفقة مع Mounjaro® و KwikPen® واتباعها.

التخلص من النفايات الطبية

- تخلص من إبر القلم المستعملة في حاوية مقاومة للثقب و Mounjaro® و KwikPen® وفقًا لتعليمات طبيبك.

يمكنك معرفة المزيد من هنا:

- تحدث مع فريقك الطبي في العيادة
- ولمزيد من المعلومات، اقرأ تعليمات الاستخدام المرفقة مع Mounjaro® KwikPen®.
- تفضل بزيارة الموقع www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro أو امسح كود الاستجابة السريعة (QR) "إلى الموقع الإلكتروني" للحصول على المزيد من المعلومات حول دواء Mounjaro®.
- امسح كود الاستجابة السريعة "إلى فيديو الاستخدام" لمشاهدة فيديو الاستخدام.

إلى فيديو الاستخدام



إلى الموقع الإلكتروني

